

Arcfiatalítás műtét nélkül!

A GIGI Quadro Time machine™ egy forradalmian új arcfiatalítási kezelési rendszert kínál műtét-, szúrás-, vágás- és fájdalom nélkül. A kezelés egyszerű, gyors és biztonságos.



1. A dinamikus vízszugár peeling eddig csak az orvos technikában alkalmazott eljárás volt. Szuper-szonikus sebességgel áramló víz és levegő keverékével, mint egy apró hűs gőzborotva peelingezi le a bőrt. Természetes módon stimulálja a kezelt felületen a biokémiai és fiziológiai folyamatokat. A dinamikus vízszugár peeling eltávolítja az elhalt hámsejteket, a pórusok mélyéről a szennyeződések. Fokozza a nyirokeringést és felélénkíti a vérkeringést. A nagy sebességgel áramló folyadék oxigénnel és nedvességgel tölti fel a bőrt. A kezelés előtt feltétlenül alaposan tisztítsuk meg a bőrt!



2. A mezotoll használata előtt egy speciális, a készülőkhöz kifejlesztett zselét viszünk fel az arcra. A hidragél magas elektrolit tartalmú, kitűnő vívő-és közvetítőanyag.



3. A következő két lépésben egy tovább fejlesztett elektroporációs eljárást végzünk. Tú nélküli mezoterápiás tollal leküzdjük a bőr és a sejtmembrán csatornák elektromos ellenállását, átstrukturáljuk a sejteket és megnyitjuk az ideiglenes pórusokat.



4. Speciálisan kizárólag a géphez kifejlesztett nyolc szérumból kiválasztjuk páciensünk bőrének legmegfelelőbb termékét és a golyós mezoapplikátor segítségével a hatóanyagot bevisszük a bőrbe. A mezotoll által megfelelően előkészített bőrön keresztül hatékonyan és nagy mennyiségben tudnak a hatóanyagok egészen a sejtekig hatolni.

A kezelés már az első alkalommal rendkívül látványos, bőrtípustól függetlenül azonnali fiatalodást eredményez! A makacs bőrhibák (pigmentfoltok, mélyebb ráncok, hegek, rosacea, stb.) kezelésére négy-hat alkalmas kúrát javasolunk.

A gépről részletes tájékoztatásért, vásárlási és bérleti lehetőségek megismerésére várjuk szeretettel nyílt napunkon 2010. október 14-én.



5. A kezelendő felületre ismét Hydra gélt viszünk fel vékony rétegben. Kezelésünk következő lépése az ionto-facelifting. Az Y-elektroda segítségével egyszerre végezzük iontoforézist és izomstimulációt.



6. A kezelés utolsó lépése a spray funkció. A spray pisztoly hidratáló, nyugtató folyadékunkat páraszerű köddé alakítja. A gőzök és gázok akadálytalanul bejutnak az arcbőrbe, a speciális folyadék így mélyen fejtheti ki hatását és teheti teljessé az arc bőr komfort érzetét.



7. Befejezőként bőrtípusnak megfelelő hidratáló krémet simítunk a bőrbe, és felhívjuk a figyelmet az otthoni ápolás fontosságára.

GIGI Vezérképviselő 06-1-350-0961,
www.gigicosmetic.hu/quadro, www.
fiatalitokezes.hu

GIGI

**EGY NÉGYFUNKCIÓS KEZELŐGÉP,
AMELY VISSZAFORGATJA
AZ IDŐ KERÉKÉT...**



GIGI TIME
QUADRO MACHINE™

Már az első kezelés megállítja az időt...



GIGI Magyarországi Vezérképviselő

- 1138 Budapest, Dagály u. 11. ■ Tel./Fax: +36 1 350 0963
- E-mail: gigi@gigicosmetic.hu
- internet: www.gigicosmetic.hu